

## Caso Clínico

### Carga Imediata

Por Prof. Dr. Carlos A. A. Oliveira

#### Apresentação do Procedimento

O caso clínico a seguir apresenta o processo completo de instalação de implantes com carga imediata, moldagem e instalação da prótese, realizados no mesmo dia, com a utilização exclusiva de produtos Bionnovation.

Paciente leucoderma 59 anos feminina, fumante, portadora de prótese total superior e inferior há 24 anos.

Proposto tratamento de próteses fixas na técnica de carga imediata no maxilar inferior.

Após avaliação radiográfica optamos pela instalação de 05 (cinco) implantes.




Aspecto clínico do rebordo inferior




Incisão sobre a crista do rebordo




Descolamento do retalho vestibular

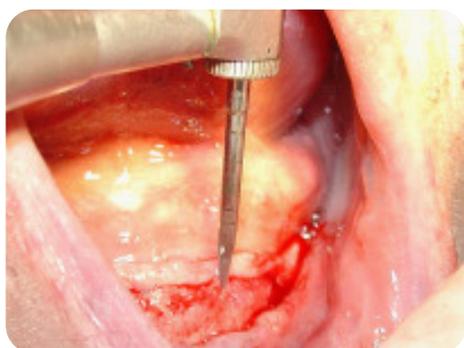

Sequência de fresagem. Fresa Lança 2,0 (cód. 05022)

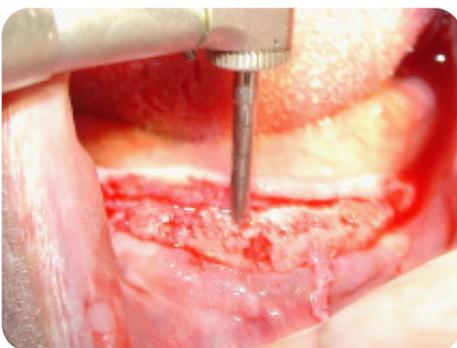


Fresa Lança 2,0 (cód. 05022)

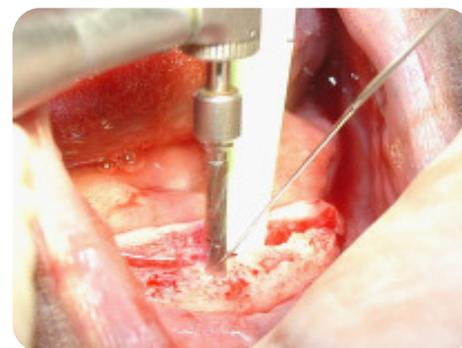

Fresa Helicoidal 2,2 (cód. 05002)  
Observar a irrigação direta sobre a fresa.



Penetração da Fresa Helicoidal 2,2

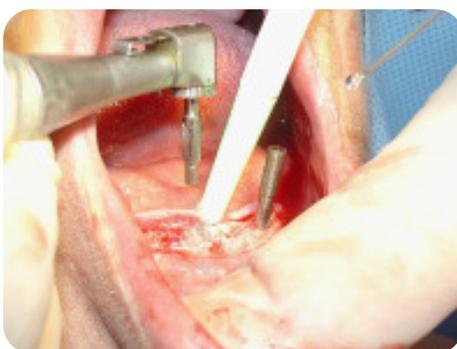

Fresa Piloto 3,2 (cód. 05010)



Fresa Cônica 3,2 (cód. 05019)

**Caso Clínico**

**Carga Imediata**

Por Prof. Dr. Carlos A. A. Oliveira




Penetração da Fresa Cônica 3,2



Countersink Plataforma Regular (RP)  
(cód. 05012)



Captura do implante com a chave para  
contra ângulo

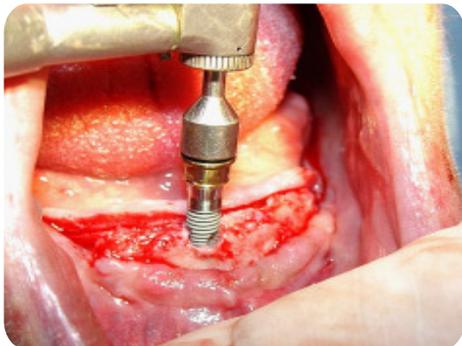


Instalação do implante com contra  
ângulo



Sequência da instalação do implante



Finalização com chave de catraca

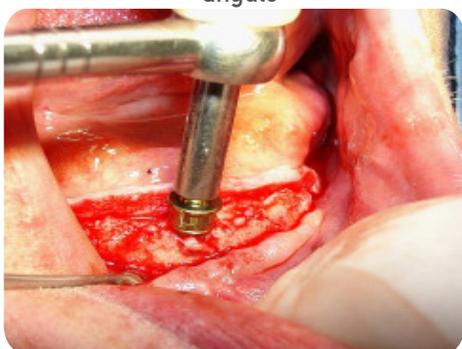

Sequência da finalização da instalação



Implantes instalados



Instalação dos Mini Cônicos  
com chave



Aplicação de 20 N no Mini Cônicos



Instalação dos transferentes



Posicionamento final dos transferentes

## Caso Clínico

### Carga Imediata

Por Prof. Dr. Carlos A. A. Oliveira



Moldagem (técnica de moldeira aberta)



Exposição dos parafusos dos transferentes



Instalação dos protetores dos Mini Cônicos



Carga imediata instalada e finalizada.



#### Professor Dr. Carlos A. A. Oliveira

Cirurgião Buco Maxilo Facial, Mestre em Patologia Bucal, Especialista em Implantodontia, MBA em Gestão Empresarial. Atua como Implantodontista há mais de 20 anos, ministra anualmente dezenas de cursos e palestras. Diretor Clínico da Bionnovation Biomedical.